
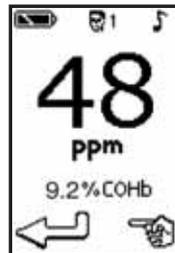
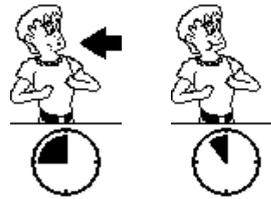


Kurzbedienungsanleitung piCO+ II

- 1 Zum Einschalten des Gerätes den Knopf drei Sekunden drücken.
- 2 Setzen Sie ein D-Stück mit einem neuen Pappmundstück ein.
- 3 Lassen Sie den Patienten einatmen und führen Sie einen Doppelklick aus.
- 4 Der Patient muß die Luft anhalten bis der 15 sekundige Countdown abgelaufen ist. Kann dieser die Luft nicht so lange anhalten, siehe Seite 9.
- 5 Die letzten drei Sekunden werden von drei Piepstönen begleitet.
- 6 Nun ruhig und gleichmäßig ausatmen und die Lunge dabei vollständig entleeren.
- 7 Der Kohlenmonoxidwert (ppm) und das prozentuale Carboxhaemoglobin (%COHb) steigen nun bis zum Spitzenwert der auf dem Display stehen bleibt an. Die farbigen LEDs leuchten entsprechend der Auswertungstabelle auf Seite 10 auf.
- 8 Entfernen Sie das D-Stück zwischen den Tests damit frische Luft an den Sensor gelangen kann.
- 9 Doppelklicken Sie für eine neue Messung. Sie gelangen zurück ins Hauptmenü und beginnen nun erneut ab Punkt 2.
- 10 Drücken Sie zum Ausschalten den Knopf und halten Sie diesen für 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet automatisch nach 5 Minuten ab, wenn keine Eingabe erfolgt.

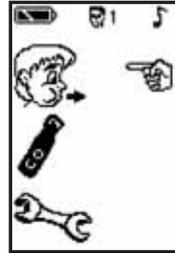

Specialmed GmbH
Roßberg 2
D-84164 Lengthal
Tel.: +49 8731 3264130
Fax: +49 8731 3264930
E-Mail: info@specialmed.e
Page: www.specialmed.de