



ToxCO⁺

Kurzbedienungsanleitung

1. Drücken Sie die Ein- Austaste 
2. Das Gerät führt nun einen Selbsttest durch (Dauer 17 sek.)
3. Setzen Sie während dessen das T-Stück und das Mundstück bzw. die Maske oder den Adapter für den Endotrachealtubus auf
4. Drücken Sie erneut den Einschaltknopf nachdem das Gerät im Display „O.K. ToxCO+“ anzeigt
5. Der Patient sollte nun seinen Atem für 15 sek. Anhalten (im Display wird ein Countdown gestartet)
6. Sobald im Display die Aufforderung „Blow“ erscheint, muss der Patient gleichmäßig und langsam seinen kompletten Lungeninhalt in das Gerät ausatmen
7. Das Gerät zeigt unmittelbar nach Beendigung der Ausatmung den höchsten gemessenen Wert an COHb im Display an
8. Für eine weitere Messung bitte direkt bei Punkt 3 mit neuem Mundstück beginnen
9. Zum Ausschalten des Gerätes den Einschaltknopf für 3 sek. Gedrückt halten
10. Nach 10 Min. ohne Messung schaltet der toxCOMeter automatisch ab

Specialmed[®] GmbH

Roßberg 2

D-84164 Lengthal

Tel.: +49 8731 3264130

Fax: +49 8731 3264930

Mail: info@specialmed.de

Page: www.specialmed.de

