



Gastrolyzer®

special
med®

Kalibrierung der Atemgasanalysegeräte

**Sehr geehrte Kunden,
wir bitten Sie freundlich um Beachtung folgender Punkte:**

- Regelmäßig erhalten wir in unserem Servicezentrum Geräte zur Reparatur eingesandt, die eigentlich voll funktionsfähig sind.
- Bei diesen Geräten wurde lediglich die Kalibrierung nicht richtig durchgeführt bzw. seit langer Zeit gar nicht mehr durchgeführt.
- In diesen Fällen messen die Geräte dann immer falsche Werte oder messen überhaupt nicht mehr.
- Die regelmäßige Kalibrierung der Geräte muß unbedingt erfolgen (Häufigkeit gemäß Angabe in der Gebrauchsanweisung), da sich der Sensor stetig (unabhängig von der Nutzungshäufigkeit) verbraucht. Dadurch verändert sich seine Leistungskurve. Durch die Kalibrierung wird die Elektronik wieder auf den aktuellen Status des Sensors abgestimmt.
- Nur so ist sichergestellt, dass Sie richtige Messwerte erhalten und so auch eine korrekte Diagnose stellen können und die Geräte zuverlässig arbeiten !

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung !

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Specialmed GmbH
Roßberg 2
D-84164 Lengenthal
Tel.: +49 8731 3264130
Fax: +49 8731 3264930
E-Mail: info@specialmed.de
Page: www.specialmed.de